

**DESTINATAIRES :** Membres du personnel soignant du CISSS des Laurentides

**EXPÉDITEUR :** Anne-Marie Lajeunesse, conseillère cadre en soins infirmiers


**DATE :** 29 avril 2020

**OBJET :** **SUBSTITUT AU THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE RECTAL  
(USAGER UNIQUE) – RUPTURE DE STOCK**

---

Les thermomètres numériques rectaux (rouge) sont présentement en rupture de stock.

En substitut, vous pouvez commander  
le thermomètre numérique buccal : **GRM 42013936**

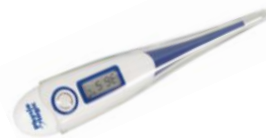

## Identification obligatoire du thermomètre selon l'utilisation

Pour éviter toute erreur, il est important :

- d'identifier le site (buccal ou rectal) de prise de température sur le thermomètre à l'aide d'un marqueur permanent noir ;
- d'identifier les deux faces du boîtier à l'aide d'une étiqueteuse (ex. : P-Touch).

L'information doit toujours être présente et lisible.

Nous recommandons de nettoyer le thermomètre avec un tampon d'alcool avant et après son utilisation. Le thermomètre doit être complètement sec avant l'utilisation. Nous vous rappelons que ce type de thermomètre est pour utilisation auprès d'un seul usager.

Soyez assurés que ceci est une mesure exceptionnelle dans le contexte COVID-19.

Nous vous remercions pour votre collaboration.