



Activités dérèglementées par des aides-soignants¹ - Installation des mesures alternatives

Pour un détail des activités dérèglementées ci-dessous, l'aide-soignant peut consulter la ressource « Méthodes de soins informatisées (MSI) »

Procédure abrégée d'installation du système de détecteur de mobilité et en assurer la surveillance	Fait ✓
<i>Inspiré de : Cadre de référence sur les mesures de remplacement à l'utilisation des mesures de contrôle (MSI, 2017)</i>	
Installation du détecteur de mobilité au fauteuil	
Se doter d'un coussin de chaise ainsi que d'un moniteur correspondant	
Procéder à l'identification sans équivoque de l'utilisateur (double identification)	
Expliquer la procédure à l'utilisateur et obtenir son consentement	
Procéder à l'hygiène des mains	
Demander à l'utilisateur de se lever (s'il est installé au fauteuil)	
Obtenir de l'aide au besoin	
S'assurer de la présence de batterie dans le moniteur	
Placer le moniteur dans son boîtier protecteur correspondant	
Installer le coussin de chaise sur l'assise du fauteuil	
Connecter le coussin de chaise au moniteur correspondant grâce à un fil de téléphone gris	
Appuyer sur le coussin afin d'effectuer et test pour s'assurer que le tout fonctionne	
Réinstaller l'utilisateur au fauteuil le cas échéant	
Procéder à l'hygiène des mains	
Aviser l'infirmière que l'installation est réalisée	
Installation du détecteur de mobilité au lit	
Se doter d'un coussin de lit ainsi que d'un moniteur correspondant	
Procéder à l'identification sans équivoque de l'utilisateur (double identification)	
Expliquer la procédure à l'utilisateur et obtenir son consentement	
Procéder à l'hygiène des mains	
Demander à l'utilisateur de se lever (s'il est installé au lit)*Il est également possible de réaliser des manœuvres au lit si l'utilisateur ne peut se lever dans le moment	
Obtenir de l'aide au besoin	
S'assurer de la présence de batterie dans le moniteur	
Placer le moniteur dans son boîtier protecteur correspondant	
Installer le coussin de lit sous le piqué au centre du lit	
Connecter le coussin de lit au moniteur correspondant grâce à un fil de téléphone gris	
Appuyer sur le coussin afin d'effectuer et test pour s'assurer que le tout fonctionne	

¹ Le **masculin** est utilisé seulement pour alléger le document et désigne tant les femmes que les hommes.

Réinstaller l'utilisateur confortablement au lit le cas échéant	
Procéder à l'hygiène des mains	
Aviser l'infirmière que l'installation est réalisée	
Surveillances d'un détecteur de mobilité	
<i>Ces éléments de surveillances sont assurés avec le professionnel qui a initié cette mesure de remplacement</i>	
S'assurer que le coussin de fauteuil/lit est bien connecté au moniteur correspondant	
Effectuer des tournées visuelles de l'utilisateur afin de documenter ses comportements et selon les directives de l'infirmière <ul style="list-style-type: none"> ➤ Surveillance constante ➤ Surveillance étroite (15 minutes) ➤ Surveillance discrète (30 minutes) 	
S'assurer de combler les besoins de base de l'utilisateur	
Aviser l'infirmière de tout changement de comportement	
Étapes complémentaires	
Lorsqu'un détecteur de mobilité doit être connecté avec la cloche d'appel, il faudra vous doter d'un Y sécurisé ainsi que d'un connecteur spécialisé permettant une telle connexion. Consulter les vidéos explicatives au besoin.	
