
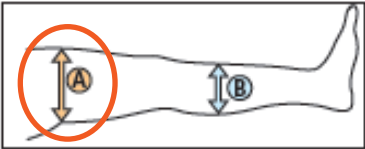


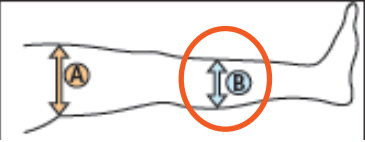


## Activités dérèglementées par des aides-soignants Installation des jambières de compression

Pour plus de détails concernant les activités dérèglementées ci-dessous,  
consulter les *Méthodes de soins informatisées (MSI)*

Installation	Fait																																																			
Procéder à la double identification de l'utilisateur	<input type="checkbox"/>																																																			
Procéder à l'hygiène des mains	<input type="checkbox"/>																																																			
Expliquer la procédure à l'utilisateur et obtenir son consentement verbal	<input type="checkbox"/>																																																			
Installer la pompe sur le pied de lit en s'assurant de permettre une circulation de l'air jusqu'aux ouvertures d'aération situées au niveau du cache cordon électrique et sous les raccords de la tubulure	<input type="checkbox"/>																																																			
Brancher le cordon de la pompe à une prise électrique	<input type="checkbox"/>																																																			
Déterminer la circonférence de la cuisse en mesurant au niveau de pli sous la fesse	 <input type="checkbox"/>																																																			
Déterminer la circonférence de la jambe en mesurant au niveau du mollet	 <input type="checkbox"/>																																																			
Déterminer la grandeur de la jambière	<input type="checkbox"/>																																																			
<table border="1" data-bbox="133 1094 748 1373"> <thead> <tr> <th colspan="4">JAMBIÈRE À LA CUISSE</th> </tr> <tr> <th>Ⓐ Circonférence à la cuisse</th> <th>Taille</th> <th>Jambière SCD<sup>MC</sup> Express</th> <th>Jambière SCD<sup>MC</sup> Comfort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt; 40,6 cm (16 po)</td> <td>T-PETIT</td> <td></td> <td>74010</td> </tr> <tr> <td>40,6 - 55 cm (16 - 22 po)</td> <td>PETIT</td> <td>9545</td> <td>74011</td> </tr> <tr> <td>55 - 71,1 cm (22 - 28 po)</td> <td>MOYEN</td> <td>9530</td> <td>74012</td> </tr> <tr> <td>71,1 - 91,4 cm (28 - 36 po)</td> <td>GRAND</td> <td>9780</td> <td>74013</td> </tr> <tr> <td>&lt; 71,1 cm (28 po)</td> <td>Jambière stérile</td> <td>9736</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="769 1094 1336 1346"> <thead> <tr> <th colspan="4">JAMBIÈRE AU GENOU</th> </tr> <tr> <th>Ⓑ Circonférence au mollet</th> <th>Taille</th> <th>Jambière SCD<sup>MC</sup> Express</th> <th>Jambière SCD<sup>MC</sup> Comfort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt; 35,6 cm (14 po)</td> <td>PETIT</td> <td></td> <td>74021</td> </tr> <tr> <td>35,6 - 53,3 cm (14 - 21 po)</td> <td>MOYEN</td> <td>9529</td> <td>74022</td> </tr> <tr> <td>48,2 - 66 cm (19 - 26 po)</td> <td>GRAND</td> <td>9789</td> <td>74023</td> </tr> <tr> <td>55 - 81,2 cm (22 - 32 po)</td> <td>T-GRAND</td> <td>9790</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Image reproduite avec l'autorisation de CardinalHealth</i></p>	JAMBIÈRE À LA CUISSE				Ⓐ Circonférence à la cuisse	Taille	Jambière SCD <sup>MC</sup> Express	Jambière SCD <sup>MC</sup> Comfort	< 40,6 cm (16 po)	T-PETIT		74010	40,6 - 55 cm (16 - 22 po)	PETIT	9545	74011	55 - 71,1 cm (22 - 28 po)	MOYEN	9530	74012	71,1 - 91,4 cm (28 - 36 po)	GRAND	9780	74013	< 71,1 cm (28 po)	Jambière stérile	9736		JAMBIÈRE AU GENOU				Ⓑ Circonférence au mollet	Taille	Jambière SCD <sup>MC</sup> Express	Jambière SCD <sup>MC</sup> Comfort	< 35,6 cm (14 po)	PETIT		74021	35,6 - 53,3 cm (14 - 21 po)	MOYEN	9529	74022	48,2 - 66 cm (19 - 26 po)	GRAND	9789	74023	55 - 81,2 cm (22 - 32 po)	T-GRAND	9790	
JAMBIÈRE À LA CUISSE																																																				
Ⓐ Circonférence à la cuisse	Taille	Jambière SCD <sup>MC</sup> Express	Jambière SCD <sup>MC</sup> Comfort																																																	
< 40,6 cm (16 po)	T-PETIT		74010																																																	
40,6 - 55 cm (16 - 22 po)	PETIT	9545	74011																																																	
55 - 71,1 cm (22 - 28 po)	MOYEN	9530	74012																																																	
71,1 - 91,4 cm (28 - 36 po)	GRAND	9780	74013																																																	
< 71,1 cm (28 po)	Jambière stérile	9736																																																		
JAMBIÈRE AU GENOU																																																				
Ⓑ Circonférence au mollet	Taille	Jambière SCD <sup>MC</sup> Express	Jambière SCD <sup>MC</sup> Comfort																																																	
< 35,6 cm (14 po)	PETIT		74021																																																	
35,6 - 53,3 cm (14 - 21 po)	MOYEN	9529	74022																																																	
48,2 - 66 cm (19 - 26 po)	GRAND	9789	74023																																																	
55 - 81,2 cm (22 - 32 po)	T-GRAND	9790																																																		
Toujours s'assurer que les jambières gonflent et dégonflent avant l'installation	<input type="checkbox"/>																																																			
Glisser la jambière sous la jambe de l'utilisateur en prenant soin de bien positionner le genou dans l'espace vide (la pompe peut fonctionner avec une ou les deux jambières installées sur l'utilisateur)	<input type="checkbox"/>																																																			
Brancher la ou les tubulures à l'arrière de la pompe	 <input type="checkbox"/>																																																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Raccorder la ou les tubulures aux jambières de l'utilisateur en respectant le côté gauche et droit (utilisateur et pompe)</li> <li>S'assurer que les tubulures ne soient pas coudées et qu'elles soient solidement fixées à la pompe et aux jambières</li> </ul>	 <input type="checkbox"/>																																																			

## Activités dérèglementées par des aides-soignants Installation des jambières de compression

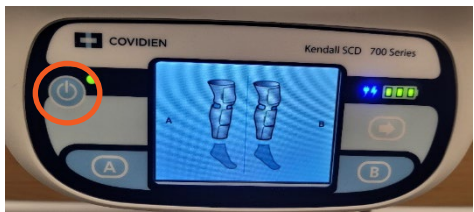Installation (suite)	Fait
<ul style="list-style-type: none"> <li>Presser le bouton de démarrage de la pompe</li> <li>Appuyer sur les boutons A et B uniquement lorsque la compression est appliquée aux pieds et non aux jambes</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>La pompe émet un bip, les témoins lumineux clignotent et l'écran s'illumine</li> <li>S'assurer que les témoins lumineux, l'écran et l'alarme sonore fonctionnent correctement</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Au premier démarrage, la configuration avec la jambière apparaît (configuration par défaut)</li> <li>Si un seul port de pompe est relié à une jambière (compression d'un seul membre), la jambe et le pied non compressé seront grisés sur l'appareil</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Attendre un cycle pour vérifier que les jambières se gonflent et se dégonflent</li> <li>Si une jambière est mise en place ou retirée après le démarrage, l'appareil doit être redémarré</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
Procéder à l'hygiène des mains	<input type="checkbox"/>
Aviser l'infirmière lorsque les jambières de compression sont installées	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aviser l'infirmière dès que vous remarquez de l'œdème ou une altération de l'état de la peau sous les jambières</li> <li>Les infirmières doivent vérifier l'état de la peau sous les jambières minimalement à tous les quarts de travail</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
Retrait	
Procéder à la double identification de l'utilisateur	<input type="checkbox"/>
Procéder à l'hygiène des mains	<input type="checkbox"/>
Recycler ou jeter les jambières selon les procédures en vigueur : <ul style="list-style-type: none"> <li>Les jambières sont réservées à un seul usager</li> <li>Les tubulures doivent être conservées</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
Désinfecter la pompe et les tubulures avec du peroxyde d'hydrogène avant de l'utiliser pour un autre usager	<input type="checkbox"/>
Entreposer le matériel selon la procédure de l'établissement	<input type="checkbox"/>
Procéder à l'hygiène des mains	<input type="checkbox"/>
Panne de l'appareil	
<ul style="list-style-type: none"> <li>S'il y a une panne, la pompe s'arrêtera, les valves pour évacuer l'air seront désactivées, un code de panne s'affichera et un signal sonore sera émis</li> <li>Consulter le service du génie biomédical</li> </ul>	<input type="checkbox"/>