

### DEMI-MASQUE

- ✓ Passer la courroie supérieure par-dessus la tête
- ✓ Attacher la courroie inférieure
- ✓ Placer l'APR le plus bas possible du nez
- ✓ Tirer sur les extrémités de la courroie supérieure puis réajuster les courroies inférieures au besoin.
- ✓ Ne pas trop serrer



### VÉRIFICATION DE L'ÉTANCHÉITÉ - À faire à chaque utilisation

- Inspirez en couvrant les filtres ou les cartouches, ou les orifices La partie faciale devrait **s'écraser** sans se déplacer
- Sinon, modifier la position de l'APR, et recommencer.



- Souffler en couvrant la valve d'expiration La partie faciale devrait **gonfler** sans se déplacer.
- Sinon, modifier la position de l'APR, et recommencer.



Figures 13 – Essais d'étanchéité à pression négative et à pression positive

### NETTOYAGE MASQUE RÉUTILISABLE

- ✓ DÉMONTER L'APR
- ✓ Laver dans une eau savonneuse à moins de 43°C, avec une brosse à poils souples si nécessaire
- ✓ Rincer les pièces avec une eau à moins de 43°C.
- ✓ Inspecter les pièces
- ✓ Désinfecter le masque en le trempant dans une solution désinfectante d'ammonium quaternaire ou d'hypochlorite de sodium (30ml (1ox) dans 7,5L (2 gallons) d'eau) ou d'un autre désinfectant au besoin.
- ✓ Essuyer ou laisser sécher
- ✓ Réassembler l'APR **en remplaçant** les pièces au besoin
- ✓ **Entreposer l'APR** dans un sac étanche

ATTENTION *Ne pas utiliser de solvants, d'alcool, de lanoline*