

Préparation pour l'utilisation du masque à cartouches P-95 ou P-100

1. Aller chercher un masque à cartouches dans la réserve sécurisée de votre unité ou prendre celui qui vous a été dédié. S'assurer qu'il n'est pas visiblement souillé ou endommagé;
2. Procéder à l'hygiène des mains (HDM);
3. Mettre l'ÉPI (blouse, masque à cartouches, protection oculaire et gants);
4. Mettre un masque de procédure sur la valve expiratoire si utilisé à moins de 2 mètres d'un usager non-confirmé COVID-19 ou si utilisé lors d'une procédure invasive avec champ stérile dans un cadre chirurgical ou procédural.
5. Procéder au test d'étanchéité (voir [procédure de montage et d'ajustement](#)) :
6. Entrer dans la chambre en précaution additionnelle.

Retrait et désinfection du masque à cartouches P-95 ou P-100

1. Retirer les gants, pratiquer l'HDM et retirer la blouse dans la chambre;
2. Effectuer l'HDM à la sortie;
3. Retirer la protection oculaire et la déposer sur une lingette désinfectante (si la consigne de réutilisation est toujours en vigueur, sinon la jeter);
4. Effectuer l'HDM;
5. Retirer le masque de procédure (si en place) et le masque à cartouches par les courroies, sans toucher le masque et le déposer sur une lingette désinfectante;
6. Procéder à l'HDM puis mettre des gants;
7. Désinfecter la lunette de protection avec une lingette désinfectante, si non jetée;
8. Retirer les cartouches (jeter si les filtres sont souillés) :
 - a. Filtres exposés : Les jeter après chaque retrait du masque à cartouches (favoriser le port prolongé si exposition à plusieurs IMGA de façon consécutive);
 - b. Filtres dans des boîtiers rigides : Les désinfecter puis humidifier légèrement un linge propre avec de l'eau et frotter les cartouches. Les déposer sur une surface désinfectée.
9. Procéder au *nettoyage* du masque :
 - a. Mouiller le masque sous l'eau courante tiède;
 - b. Appliquer du savon à main sur celui-ci et bien frotter chaque partie;
 - c. Rincer sous l'eau;
 - d. Assécher le masque avec un linge doux.
10. Procéder à la *désinfection* de masque à cartouches avec une lingette désinfectante ou un désinfectant liquide en bouteille (respecter le temps de contact humide) :
 - a. Débuter par les courroies du masque;
 - b. Ensuite, procéder à la désinfection de l'intérieur du masque en prenant soin de n'oublier aucun racoin;
 - c. Terminer par l'extérieur du masque.
11. Rincer à l'eau courante tiède pendant 2 minutes, puis bien assécher;
12. Remettre les cartouches dans des boîtiers rigides sur le masque;
13. Retirer les gants et procéder à l'HDM;
14. Entreposer le masque, et le sac de papier brun s'il y a lieu, dans un endroit sec et propre;
15. Changer les cartouches tous les 30 jours ou après 40h d'utilisation et inscrire l'information dans le [registre](#) prévu à cet effet.