

RAPPEL - Résumé des normes RCR

	ADULTE	ENFANT	BÉBÉ
DÉFINITION	À partir des premiers signes de puberté	1 an jusqu'aux premiers signes de puberté	Jusqu'à 1 an
FRÉQUENCE	100 – 120/minute	100 – 120/minute	100 – 120/minute
RATIO	30:2	1 intervenant 30:2 <u>2 intervenants 15:2</u>	1 intervenant 30:2 <u>2 intervenants 15:2</u>
TECHNIQUE	2 mains	1 ou 2 mains	2 doigts
PROFONDEUR	1/3 de la profondeur thorax	1/3 de la profondeur thorax	1/3 de la profondeur thorax

Différences entre le DEA Zoll AED+ et le DEA Philips FRX



DEA Zoll AED+



DEA Philips FRX

Coordination des services préhospitaliers d'urgence
Direction des services multidisciplinaires

www.santelaurentides.gouv.qc.ca

Feuillet d'information sur les différences entre le DEA Zoll AED+ et le DEA Philips FRX à l'intention des premiers intervenants policiers des Laurentides

Deux modèles de DEA à votre disposition

Deux modèles de DEA sont disponibles aux premiers intervenants policiers des Laurentides, soit le DEA Zoll AED+ et le Philips FRX.

Peu importe la formation initiale reçue, les deux modèles de DEA peuvent être utilisés par tous les premiers intervenants policiers des Laurentides. Les deux DEA ont plusieurs similarités. Les deux effectuent des analyses aux deux minutes et nous indique quand un choc est nécessaire.


Zoll AED+



- Électrodes de défibrillation avec dispositif de rétroaction qui sont connectées ensemble.
- Électrodes compatibles avec moniteur/DEA des paramédics.
- Aucun mode pédiatrique*.
- Fournit rétroaction de « masser plus fort » au besoin.
- Enregistrement audio disponible selon le modèle.
- Enregistrement des données numériques.

*Électrodes pédiatriques recommandées par le manufacturier. Nous acceptons régionalement les électrodes adultes en position antéro-postérieure (voir l'image sur la prochaine page).

Placement des électrodes de défibrillation

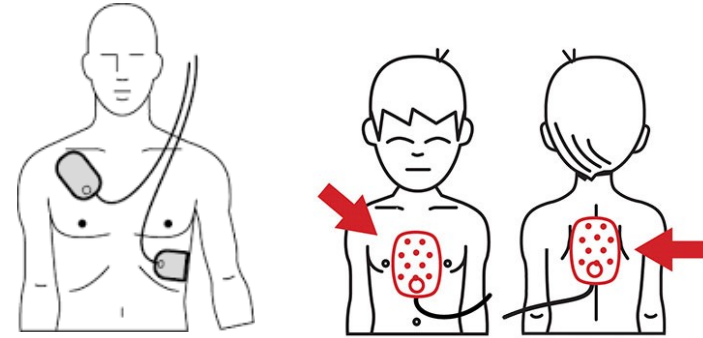

Philips FRX



- Électrodes de défibrillation séparées sans dispositif de rétroaction.
- Électrodes non compatibles avec moniteur/DEA des paramédics.
- Aucun enregistrement audio, enregistrement des données numériques.
- « Clé pédiatrique » pour les patients de moins de 25 kg, s'installe sur le dessus du DEA selon l'image suivante :

