

Procédure de lecture thermomètre min-max Réfrigérateur à vaccins

RELEVÉ DE TEMPÉRATURES

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides Québec Direction de santé publique

Nom de l'établissement : _____
Code de l'établissement : _____ Mois : _____ Année : _____
Réfrigérateur (identification) : _____ Réfrigérateur (localisation) : _____

Après chaque lecture des températures, appuyer sur les deux boutons « RESET »

Après chaque lecture des températures, appuyer sur le bouton « MEMORY CLEAR »

SI LA TEMPÉRATURE EST < 2 ou > 8 °C, SUIVRE LA PROCÉDURE EN CAS DE BRIS DE LA CHAÎNE DE FROID

Date	INSCRIRE LES TEMPÉRATURES ACTUELLE, MINIMALE ET MAXIMALE 3 FOIS PAR JOUR															Commentaires
	JOUR					SOIR					NUIT					
	Heure	Actuelle	Min.	Max.	Init.	Heure	Actuelle	Min.	Max.	Init.	Heure	Actuelle	Min.	Max.	Init.	
1																
2																

- 3 fois par jour, soit à chaque début de quart de travail, noter les 3 chiffres visibles sur le thermomètre min-max :
 - Gros chiffre du haut = température actuelle. Indique la température interne au moment présent
 - Petit chiffre en bas à gauche = température minimale. Indique la température interne la plus basse atteinte dans le réfrigérateur depuis la dernière remise à zéro (reset).
 - Petit chiffre en bas à droite = température maximale. Indique la température interne la plus haute atteinte dans le réfrigérateur depuis la dernière remise à zéro (reset).

À noter que dans l'exemple de droite, il faut tout d'abord s'assurer que le cadran affiche bien les MIN et MAX et non les températures de configuration LO et HI. Si ce n'est pas le cas, appuyer une fois sur le bouton MODE.

Inscrire sur le relevé :

- L'heure de la vérification;
- Les 3 températures dans leur case respective;
- Vos initiales;
- Si applicable, inscrire dans la section commentaires toute information pertinente ayant pu impacter la température ex. : réception de la commande, porte ouverte durant 15 min.



Si une des températures se situe en-dessous de 2°C ou au-dessus de 8°C, ne pas faire de « reset ». Aviser immédiatement la Direction de la vaccination, du prélèvement et du dépistage au 450-432-2777 #81514 et mettre les vaccins en quarantaine dans un frigo entre 2°C et 8°C avec une note « Vaccins en quarantaine, ne pas utiliser ».

- Une fois les 3 chiffres inscrits sur le relevé, faire une remise à zéro. Dans l'exemple de gauche, il faut appuyer en alternance sur les 2 petits boutons bleus à l'extrémité inférieure gauche et droite du thermomètre. Pour l'exemple de droite, il faut appuyer sur le bouton « Memory clear ». Vous référer au manuel de l'utilisateur pour tout autre type de thermomètre.