

## Formulaire Vérification du relais du système d'alarme à la centrale de surveillance



La personne responsable du site doit être avisée de la visite et de la procédure avant de compléter le test.

Étape	Critère ou information	
<b>1 - Planification</b>	Code vaccinateur	
	Nom du site	
	Adresse de l'installation	
	Numéro du local	
	Date prévue du test	
	Heure prévue du test	
	Nom de la personne responsable du site avisée du test	
<b>2 - Déplacement des vaccins et génératrice</b>	En quantité suffisante?	<input type="checkbox"/> Glacières <input type="checkbox"/> Tapis réfrigérants <input type="checkbox"/> Affiche d'identification de vaccins en quarantaine
	Génératrice présente?	<input type="checkbox"/> Oui : procédure à proximité? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Non
<b>3 - Informations réfrigérateurs</b>	Identifiant du réfrigérateur à la centrale d'alarme (voir tableau de l'aide-mémoire)	
	Température du réfrigérateur au début du test	_____ degrés Celsius
	Note ajoutée au relevé de températures et températures actuelles/min/max inscrites	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>4 - Test</b> <b>*Le test consiste à ouvrir la porte du réfrigérateur et à noter les informations requises.</b>	Début du test (lors de l'ouverture de la porte)	Heure : _____
	Alarme sonore lors de l'ouverture du frigo?	<input type="checkbox"/> Oui    Heure : _____ <input type="checkbox"/> Non
	Température atteint 8 degrés Celsius (laisser sonner 2 minutes)	Heure : _____
	Alarme audible sur le site?	<input type="checkbox"/> Oui    Heure : _____ <input type="checkbox"/> Non
	Température affichée lorsque l'alarme sonore est déclenchée	_____ degrés Celsius

## Formulaire **Vérification du relais du système d'alarme** à la centrale de surveillance

Étape	Critère ou information	
	Appel de la sécurité de Saint-Jérôme pour aviser le site de l'alarme <b>* Si aucun appel après 5 minutes du déclenchement de l'alarme de température haute ou après 15 minutes au-dessus de 8 degrés Celsius en l'absence d'alarme, refermer la porte, appeler au poste 22214 ou au (450) 431-8455.</b>	<input type="checkbox"/> Oui    Heure : _____ <input type="checkbox"/> Non
	Appel de la centrale de surveillance pour aviser le site de l'alarme	<input type="checkbox"/> Oui    Heure : _____ <input type="checkbox"/> Non
	Est-ce la bonne personne qui est avisée de l'alarme?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non, qui aviser : _____
<b>5 - Résultat</b>	On considère une réussite si : 1- une alarme est audible sur le site à l'atteinte de 7 ou 8 degrés; 2-l'appel de la sécurité de St-Jérôme ou de la centrale directement reçu au maximum 5 minutes après le déclenchement de l'alarme de température haute. 3-Le bon poste (ou la bonne personne) est avisé de l'alarme.	<input type="checkbox"/> Réussite <input type="checkbox"/> Échec, inscrire la ou les raison(s) de l'échec :
<b>6 - Commentaires et autres observations</b>		
<b>7 - Retour à la normale</b>	La température du réfrigérateur est redescendue sous 8 degrés Celsius en 15 minutes ou moins	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Test effectué par :</b>		
	Nom en caractère d'imprimerie	Signature

Faire parvenir le formulaire complété aux adresses courriels suivantes en indiquant en objet Compte-rendu – Test relais alarme – *Nom du site*. Si le test a échoué, expliquer brièvement la raison. Le département de la sécurité s'assurera de résoudre le problème dans les plus brefs délais.

[jasmine.thiffault.cissslau@ssss.gouv.qc.ca](mailto:jasmine.thiffault.cissslau@ssss.gouv.qc.ca)

[gestion.vaccins.dvdpd.cissslau@ssss.gouv.qc.ca](mailto:gestion.vaccins.dvdpd.cissslau@ssss.gouv.qc.ca)